



SILLAPLAYA - MANUAL DEL USUARIO

Muchas gracias por la confianza que ha depositado en nosotros con su compra y enhorabuena por el producto que ahora tiene entre sus manos, porque estamos seguros de que la SILLAPLAYA va a hacerle pasar estupendos momentos y va a contribuir a hacer su vida, porqué no, un poco más placentera. Ése fue al menos el objetivo con que fue diseñada.

A continuación le presentamos unas breves instrucciones relativas a la **seguridad, montaje, funcionamiento y mantenimiento** de la SILLAPLAYA. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de empezar a disfrutarla.

1. SEGURIDAD

- La arena de playa no es un terreno liso, para evitar caídas o deslizamientos no deseados tanto del tronco como de las piernas, no olvide abrocharse los cinturones, y sólo deberá desabrocharlos en el momento de meterse en el agua.
- Recuerde que su SILLAPLAYA no ha sido diseñada para un baño pasivo en flotación. El objetivo es llevarle a usted hasta el interior del mar, río, etc. para permitirle la natación o el baño libre. No intente permanecer sobre la silla cuando alcance con ella una cierta profundidad (aprox. 0,5m): los elementos de flotación son las ruedas, y éstas quedan por debajo de la silla, por lo que ésta no es estable flotando en el agua. ¡Métase en el agua y disfrute del placer de un buen baño!

2. MONTAJE

Su silla viene desmontada en la caja, pero su montaje es tremendamente sencillo (recuerde que la silla puede ser armada y desarmada siempre que quiera transportarla en un vehículo de pequeñas dimensiones):

- Coloque las ruedas traseras introduciendo los ejes en los agujeros traseros y bloqueándolos con las pinzas de seguridad que le adjuntamos.
- Atornille con las manos la rueda delantera.
- Levante el respaldo y fíjelo con las pinzas de seguridad. El respaldo tiene diferentes posiciones que podrá usted variar siempre que lo desee sólo con cambiar de agujero el eje de la pinza (ATENCIÓN: tenga cuidado con el manejo de las pinzas de seguridad, su potente muelle tiene cierta tendencia a cerrarse sobre el dedo como un cepo produciendo un pellizco inofensivo pero doloroso).
- La inclinación del asiento de su silla también puede regularse para la comodidad de los distintos tamaños de persona. Debajo del asiento encontrará usted un tubo que desliza dentro de otro admitiendo diferentes alturas según la posición en la que coloque el tornillo que lo atraviesa (para sacarlo y cambiarlo de posición sólo tiene que desenroscar la cabeza de plástico negro).



- Si ha adquirido una SILLAPLAYA con reposabrazos, éstos vendrán ya instalados en su silla. Los reposabrazos pueden quitarse y ponerse fácilmente bloqueándolos con unos pequeños seguros.

Muy bien, ¡su SILLAPLAYA ya está lista! Siéntese en ella, abróchese las correas y deje que le empujen en un agradable paseo por la orilla, o métase en el agua a disfrutar de un baño. Con las ruedas de diámetro medio o grande un usuario con fuerza suficiente en los brazos podrá desplazarse por sí mismo apoyando las palmas de las manos sobre los neumáticos y empujando como lo haría con los aros de su silla.

3. FUNCIONAMIENTO

3.1- Entrada en el agua

La entrada en el agua requerirá de 0 a 3 personas adicionales dependiendo del grado de discapacidad del usuario. Tanto usuarios sólo con dificultad de movimiento (debida a parálisis parciales o problemas motores) como usuarios ágiles y fuertes con inmovilidad de las extremidades inferiores serán capaces, con un poco de práctica, de realizar la entrada solos. Discapacidades mayores o usuarios con menor agilidad requerirán la ayuda de 1 a 3 personas (en casos de total inmovilidad).

En cualquiera de los casos la silla deberá introducirse en el agua hasta una cierta profundidad, justo hasta el punto en que nuestro peso empieza a no ser suficiente y la silla comienza a flotar. Entonces abriremos los cinturones y nos dejaremos caer suavemente por el lateral (si somos autónomos), o trasladaremos al usuario hasta el agua, poniendo cuidado en que la silla no se vuelque sobre nosotros mismos.

3.2- Salida del agua

Si hasta el momento un usuario fuerte y ágil no ha necesitado ayuda para desplazarse y entrar en el agua, éste es el momento en el que sí vamos a necesitar de alguien que sostenga la silla (a la profundidad a la que pueda hacerlo con firmeza y comodidad) mientras nos subimos a ella. Así, igual que con la entrada al agua, para la salida se requerirán de 1 a 3 personas dependiendo de la discapacidad del usuario. La silla flota inestable y se balancea, siga nuestro consejo para aprender rápidamente a subirse a ella (para usuarios independientes):

Le recomendamos que no intente sentarse sobre la silla de golpe, primero tumbese sobre ella con las piernas estiradas y los brazos abiertos para equilibrarla, y deje que le acerquen a la orilla. Cuando la silla toque fondo, entonces colóquese en la posición correcta.

Para todos los usuarios: las primeras veces es muy probable que este ejercicio le cueste algunos intentos ¡pero no desespere!: enseguida aprenderá a salir del agua con rapidez y facilidad.



4. MANTENIMIENTO

Su SILLAPLAYA es una silla robusta y resistente que seguro le dará muchos años de satisfacciones si sigue unas mínimas instrucciones de mantenimiento:

- Después de haberla introducido en agua salada, no olvide lavar su silla con agua dulce (con una manguera o aprovechando las duchas que encontrará en nuestras playas).
- La estructura de su silla es hueca para hacerla más ligera; esto significa que cuando la meta en el agua una cierta cantidad de agua entrará en los tubos, por lo que le recomendamos que la haga salir después del último baño y el lavado. Inclíne su silla (más ligera sin ruedas) en las diferentes direcciones de las aberturas de los tubos y verá como éstos se vacían. Repitiendo estos movimientos hasta comprobar que ya no queda más agua en el interior, conservará su silla en buen estado mucho tiempo, además de evitar charcos indeseados en el interior de su vehículo en caso de que lo utilice para el transporte de la SILLAPLAYA.
- Entre una temporada de verano y otra no olvide engrasar tornillos y ejes con grasa o aceite para evitar el óxido o un envejecimiento prematuro.
- Aunque es bastante improbable, en caso de pinchazo la reparación de las ruedas ROOLEZ es muy sencilla: con su silla le ha sido enviada una bolsita con trocitos de la misma goma que las ruedas, localice el pinchazo, corte un trocito pequeño de goma y póngala sobre el agujerito o corte. Con un soldador de estaño derrita la goma y alísela sobre el neumático con la ayuda de cualquier herramienta roma o redondeada, después, déjelo enfriar. El agujero quedará tapado y sus ruedas volverán a su resistencia habitual.

Y con esto hemos llegado al final de nuestras instrucciones. Ahora sólo nos queda desearle que disfrute de su silla y de los nuevos y hasta ahora inaccesibles lugares que la SILLAPLAYA le va a descubrir.